



Mepore® Film & Pad

Film absorbant auto-adhésif, transparent et respirant

Mepore® Film & Pad est un film absorbant auto-adhésif transparent. Offrant une grande facilité d'utilisation, sa conception discrète attire moins l'attention, ce qui est tout bénéfique pour le confort de vos patients.

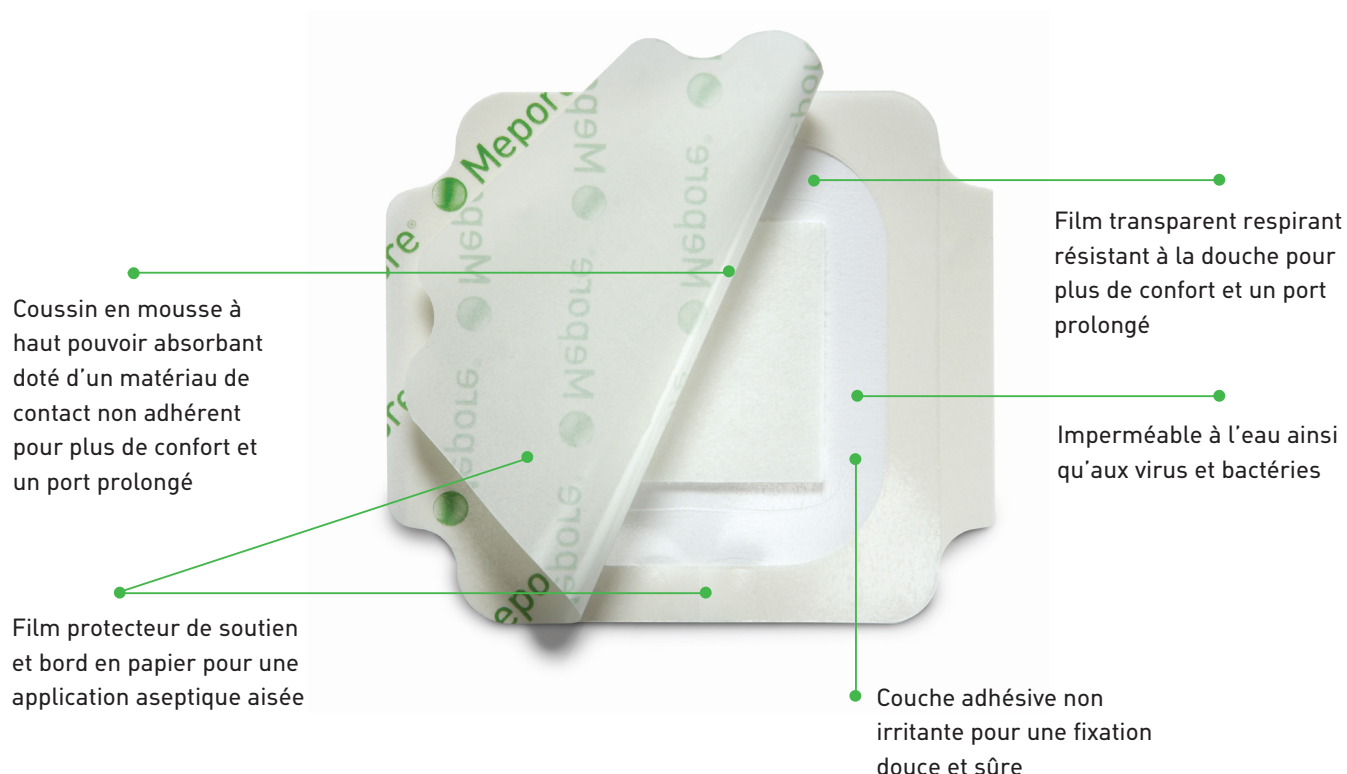

Mode d'emploi

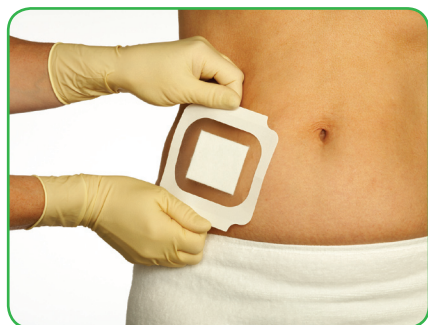

Enlevez le film protecteur. Positionnez le pansement. Veillez à ne pas étirer le pansement.



Enlevez les bords en papier ainsi que les deux rabats latéraux en papier blanc lors de l'application.



Placez la main quelques secondes sur le pansement afin qu'il colle bien.

Mode d'action de Mepore® Film & Pad

Grâce au coussin en mousse hautement absorbant et à l'évaporation importante rendue possible par le film externe, le pansement offre une gestion efficace de l'exsudat. Mepore® Film & Pad forme une couche protectrice souple et transparente. Il s'adapte parfaitement aux contours du corps et au relief irrégulier de la peau. L'adhésif polyacrylate est conçu pour être non irritant pour la peau, tout en assurant une fixation durable. Les pansements Mepore® Film & Pad sont faciles à utiliser et garantissent une application stérile, même avec des gants.

Avantages de Mepore® Film & Pad

- Matériau de contact non adhérent
- Haut pouvoir respirant
- Bonne gestion de l'exsudat
- Facilité d'application, également avec des gants
- Se conforme au relief irrégulier de la peau
- Protection contre les virus, les bactéries et les écoulements
- Fixation douce et sûre
- Couche adhésive non irritante
- Douche possible
- Vaste assortiment



Domaines d'utilisation

- plaies peu ou moyennement exsudatives
- plaies chirurgicales
- coupures et écorchures

Précautions

Ne pas utiliser Mepore® Film & Pad chez les patients sensibles à l'adhésif acrylate. Appliquez le pansement sans l'étirer afin de ne pas abîmer la peau. En cas de signes cliniques d'infection, instaurer un traitement adéquat.

Gamme Mepore® Film & Pad (stérile)

Dimensions (en cm)	Coussin (en cm)	Code CNK	N° d'art.	Cond./boîte	Emb. de transport
4x5	1,5x2,5	-	275100	85	340
5x7, Ovale	2,5x4	-	275200	85	340
5x7	2,5x4	-	275300	85	340
9x10	4,5x5	-	275400	30	180
9x15	4,5x10	-	275500	30	240
9x20	4,5x15	-	275600	30	240
9x25	4,5x20	-	275700	30	150
9x30	4,5x25	-	275800	25	125
9x35	4,5x30	-	275900	25	100
4x5	1,5x2,5	2509-537	275110	5	70
5x7, Ovale	2,5x4	2509-545	275210	5	70
5x7	2,5x4	2509-552	275310	5	70
9x10	4,5x5	2509-560	275410	5	50
9x15	4,5x10	2509-578	275510	5	50
9x20	4,5x15	2509-586	275610	5	40